

agilomed® Aktiv-Pflaster

Schnelle Linderung von Schmerzen:
Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Krämpfe

Medizinprodukt zur Einmalanwendung.
Mit natürlichen Inhaltsstoffen.

Gebrauchsanweisung:

1. Beutel öffnen und das Pflaster entnehmen.
2. Die transparente Schutzfolie entfernen.
3. Das Pflaster auf die betroffene Körperstelle aufkleben und sorgfältig andrücken.



Das Pflaster kann mit der Schere zugeschnitten werden,
falls ein kleineres Format benötigt wird.

Hinweise:

Zur äußeren Anwendung.

Das Pflaster 24 Stunden lang einwirken lassen und danach durch ein neues Pflaster ersetzen. Nur auf unverletzter, sauberer und trockener Haut anbringen. Verwenden Sie agilomed® Aktiv-Pflaster nicht öfter als an 4 aufeinander folgenden Tagen, um eine Hautreizung zu vermeiden. Nicht verwenden, wenn der Beutel beschädigt oder geöffnet ist.



ECA-MEDICAL

agilomed® Aktiv-Pflaster

Schnelle Linderung von Schmerzen: Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Krämpfe

Das Medizinprodukt wurde mit einer speziellen Formel entwickelt, um die wohltuenden Wirkungen seiner Bestandteile, darunter Teufelskralle, Arnika, Weidenrinde und Weihrauch, bestmöglich für eine lokale und kutane Behandlung von Muskel- und Gelenkschmerzen zu nutzen.

agilomed® Aktiv-Pflaster hilft mit seinen natürlichen Inhaltsstoffen Gelenkschmerzen und Muskelschmerzen verschiedenster Ursachen, wie rheumatischen Beschwerden, Sporttraumata und Lumbalgie (Schmerzen im Lendenwirbelbereich) zu lindern. Verschafft Erleichterung bei Muskel- und Gelenkschmerzen.

Die Wirkung der innovativen agilomed® Aktiv-Pflaster hält bis zu 24 Stunden an.

OHNE FARBSTOFFE, OHNE KONSERVIERUNGSTOFFE, HINTERLÄSST KEINE FLECKEN UND FETTET NICHT. Medizinprodukt zur Einmalanwendung.
Mit natürlichen Inhaltsstoffen.

Gebrauchsanweisung:

1. Beutel öffnen und das Pflaster entnehmen.
2. Die transparente Schutzfolie entfernen.
3. Das Pflaster auf die betroffene Körperstelle aufkleben und sorgfältig andrücken.

Das Pflaster 24 Stunden lang einwirken lassen und danach durch ein neues Pflaster ersetzen. Das Pflaster kann mit der Schere zugeschnitten werden, falls ein kleineres Format benötigt wird.

Hinweise: Zur äußeren Anwendung. Nur auf unverletzter, sauberer und trockener Haut anbringen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Die Gebrauchsanweisung lesen. Die Behandlung im Fall von erkennbaren Reizerscheinungen oder Überempfindlichkeiten gegen das Produkt abbrechen. Bei schwerwiegenden Vorkommnissen wenden Sie sich bitte an den Hersteller und an die verantwortliche Behörde. Funktionsweise und Sicherheit des Produkts werden durch die Unversehrtheit des Beutels garantiert. Verwenden Sie agilomed® Aktiv-Pflaster nicht öfter als an 4 aufeinander folgenden Tagen, um eine Hautreizung zu vermeiden. Nicht verwenden, wenn der Beutel beschädigt oder geöffnet ist.

Inhaltsstoffe:

Polyacrylat, Glycerin, Harpagophytum procumbens, Arnica montana Extrakt, Salix alba cortex Extrakt, Campher, Boswellia serrata Extrakt, Polysorbat 60

Vertrieb:

ECA-Medical HandelsGmbH
Mitterweg 4
A-6265 Hart im Zillertal



06/11/01/2021   Eurosil S.p.A.
Viale Europa, 30
20047 Cusago (MI) - Italy        CDT858439